


Digital röstförstärkare WAP-7 D

BRUKSANVISNING

Laddningsfaser:

1. **Blå=** Apparaten på, batterierna laddade
Gul= Batterier måste laddas
Grön= Batteriet fulladdat
Röd= Batteriet laddas

2. Ögla för halsband
 3. Volymreglage
 4. Av och på stängningsknapp
 5. Mikrofon ingång
 6. Anslutning cd e.d.
 7. Anslutning laddning
- A. Miniatur mikrofon med clips
B. Headset för mikrofon
C. Clips
D. Fästplatta för F och G
E. Laddnings kabel
F. Halsband
G. Bärrem
H. Anslutningskabel för CD e.d.
I. Förlängningskabel mikrofon
Transportväska (ej avbildad)

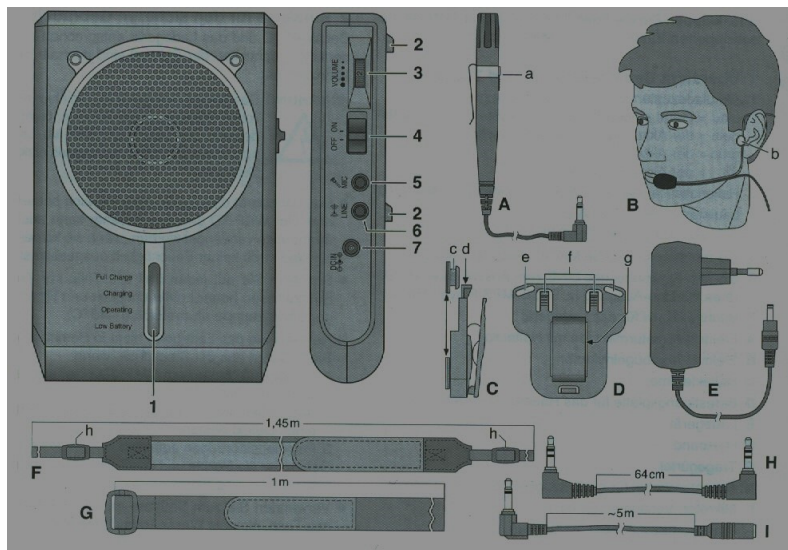

Laddningskontakten får endast användas inomhus och ej utsättas för väta
RF skyddas för väta, hög luftfuktighet och hetta (anv. område 0-40°C)

Tag inte RF i bruk om Du

- 1 upptäcker synliga skador på laddningskabel eller apparat
 - 2 efter fall eller liknande om misstanke för skada föreligger
 - 3 om funktionsstörning uppträder
- Lämnas för reparation till fackman

Garantin gäller inte vid felaktigt användande av utrustningen eller om en icke fackmannamässig reparation utförts.

RF är en högst behändig apparat med inbyggd högtalare.

Genom det uppladdningsbara batteriet och de många bärmöjligheterna är en mobil användning upp till 30 timmar möjlig. Till RF finns två olika mikrofoner, en mikrofon med clips samt ett headset.

Laddning av WAP-7D

RF är utrustad med två Litiumbatterier.

1. Anslut laddningskabeln till DC in och stickkontakten till 220V-uttag. Efter några sekunder tänds balken röd. RF behöver inte vara påslagen vid laddningen.
2. Vid urladdat batteri kan det ta ca: 3 timmar innan full laddning uppnåts. När batteriet är fulladdat lyser balken grön. Tag bort laddningskabeln från RF när laddningen är klar för att förhindra att de överladdas. (Risk för överhettning och förkortning av batteriets livslängd.)
3. När batteriet är fulladdat kan RF användas i 30 timmar, tiden kan förlängas om ljudstyrkan sänks.

VIKTIGT

*Så snart balken börjar lysa gult måste RF laddas. Lämna aldrig Rf oladdad i någon längre tid då detta förkortar livslängden på batteriet.
Defekta batterier får endast bytas av fackverkstad.*